

Soft Contrastor

Fonction :

Les Soft Contrastor TM sont des produits uniquement destinés à masquer des éléments inesthétiques dans une photo dentaire (langue, narines, moustache, cils etc.), leur couleur noir mat augmente le contraste des dents les mettant ainsi en valeur. Ils sont composés d'une feuille d'acier inoxydable enrobée dans un silicone noir mat.

Ils peuvent facilement être courbés pour s'adapter aux besoins du praticien.

La souplesse du silicone est plus confortable pour le patient

Utilisation :

Les diverses formes dépendent des secteurs à photographier avec ou sans miroir.

Il est possible de les plier ou les courber sans outils.

Entretien :

La surface noire mat est fragile.

Laver avec un savon et de l'eau tiède ou un désinfectant doux en frottant délicatement avec une éponge douce. Essuyer avec un chiffon doux non pelucheux.


Ne pas utiliser de chiffon textile ou papier qui laisseront des peluches sur le silicone.

Eviter la machine à laver ou le bac à ultrasons.

Stocker à l'abri de la lumière pour éviter une éventuelle décoloration de la surface noire mat.

Stérilisation :

Les Soft Contrastor peuvent être passés en autoclave : 121°C ou 134°C durée maximale 30 minutes. Il faut veiller à ce qu'ils soient bien secs au moment de la mise en pochette. Les autres procédés de stérilisation sont déconseillés.

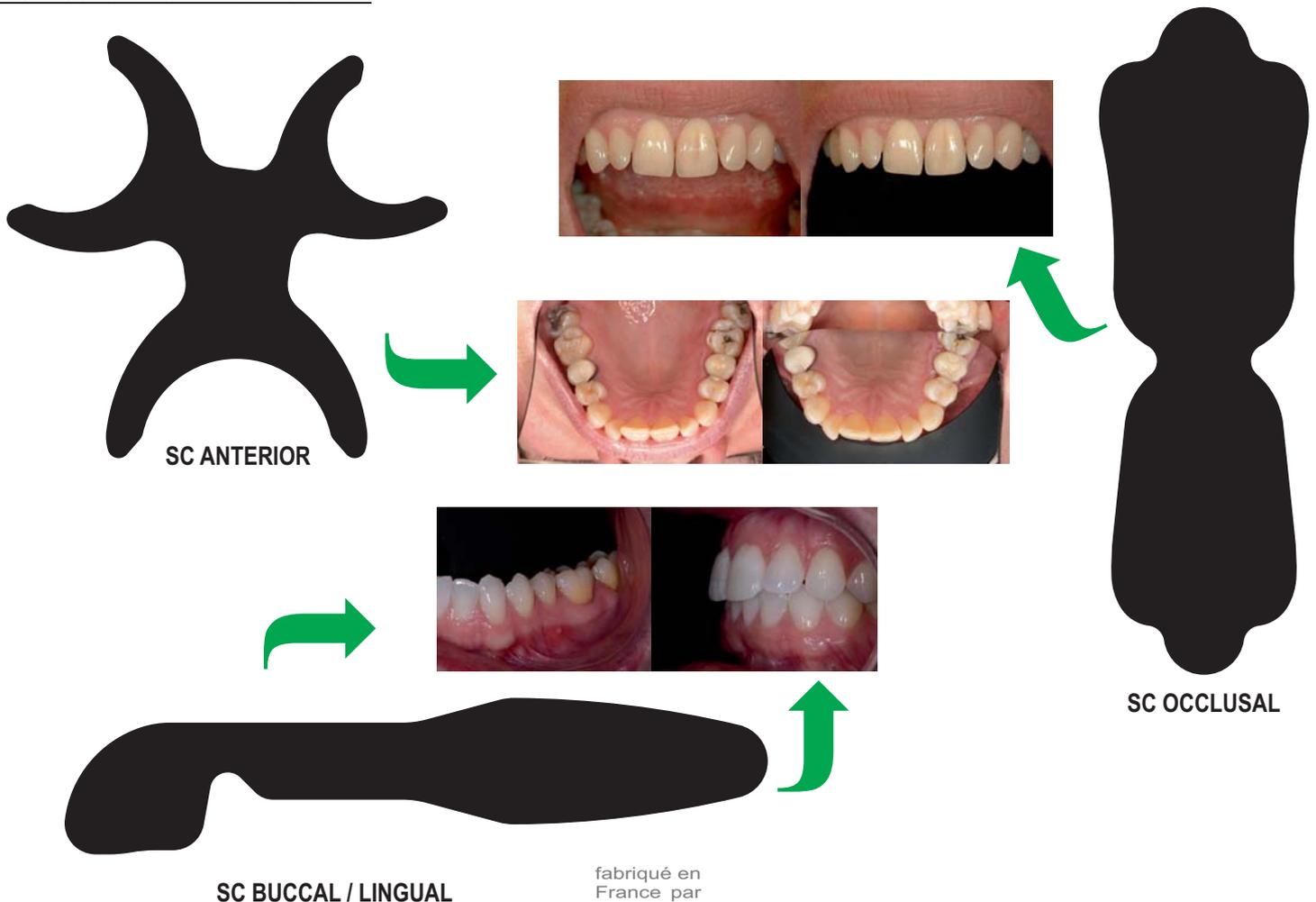

fabriqué en
France par

PTJ

INTERNATIONAL

CE