


Miroirs pour photographies intrabuccales

Fonction :

Une photo dentaire doit toujours être prise sous un axe perpendiculaire au sujet pour être significative. La bouche étant une cavité certaines faces de la dentition ne sont pas accessibles en vision directe. C'est pourquoi l'usage de miroirs s'avère indispensable.

Nos miroirs sont en verre de 3mm d'épaisseur métallisé sous vide avec un dépôt de chrome sur une ou deux faces.

Ils sont inoxydables et garantissent un reflet de grande qualité non déformant sans image fantôme. Une variante avec l'ajout d'une couche de dioxyde de titane offre une réflexion supérieure (miroirs titanes).

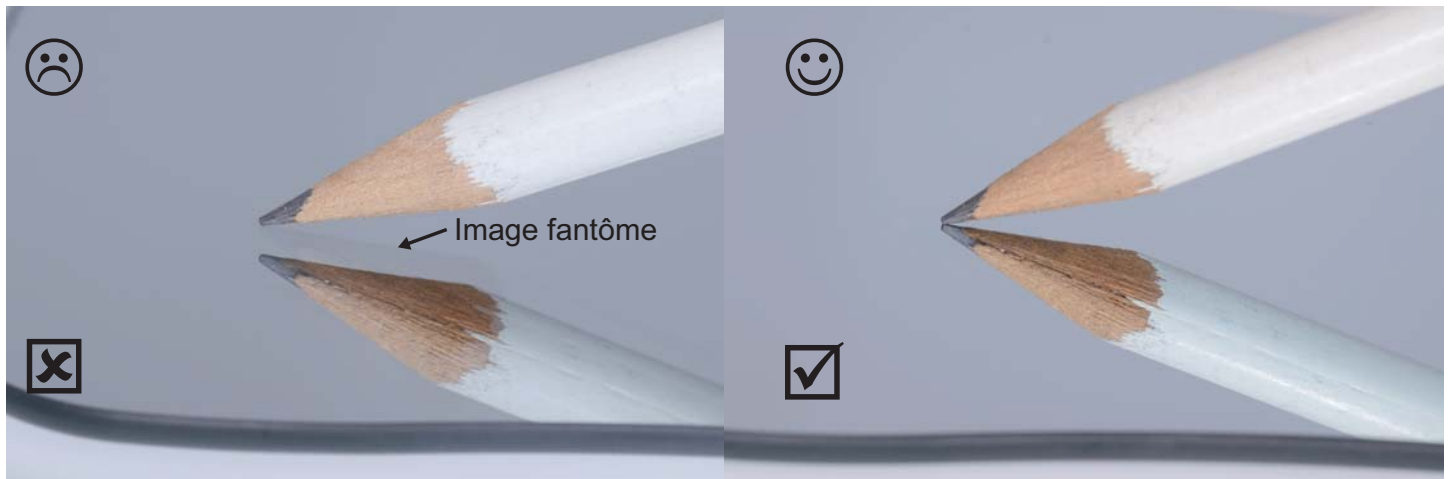

Métallisation face arrière

Métallisation face avant

Utilisation :

Le miroir sera introduit dans la cavité buccale et orienté de telle sorte que le secteur à photographier se réfléchisse dans le miroir. C'est cette image réfléchie qui sera photographiée.

La forme du miroir sera choisie en fonction de la zone à photographier.

Le miroir sera tenu par le praticien, son assistante ou même le patient.

Il conviendra de pré-chauffer le miroir (40°C environ) afin de retarder l'apparition de buée due au fort taux d'humidité à l'intérieur de la cavité buccale. Quelques jets d'air comprimé donneront le même effet.

Entretien :

Les miroirs sont sensibles à la rayure, il conviendra de les manipuler et de les stocker avec soin en ne les mélangeant pas avec des instruments métalliques.

Très important : Un miroir souillé doit être maintenu humide jusqu'au moment du lavage en l'immergeant dans de l'eau ou en le maintenant entre 2 lingettes humides.

On évitera de les mettre dans une machine à laver et/ou bac à ultrasons.

Le nettoyage se fera avec de l'eau et un détergent doux. On veillera à les essuyer avec un chiffon doux et non pelucheux. Il est également possible d'utiliser des produits de décontamination en prenant les mêmes précautions.

Stérilisation :

Les miroirs peuvent être passés en autoclave : 121°C ou 134°C durée maximale 30 minutes. Il faut veiller à ce qu'ils soient bien secs au moment de la mise en pochette.

Sécurité :

Tout miroir présentant une rayure raccrochant à l'ongle, un ou des éclats ou coquilles en périphérie devra être immédiatement éliminé.

fabriqué en
France par

PTJ

INTERNATIONAL

CE

SECURITÉ :

Tout miroir présentant une rayure rattachant à l'ongle, un ou des éclats ou coquilles en périphérie devra être immédiatement éliminé.



Plans miroirs échelle : 1/1

L

**Occlusal
enfant**

XXL

Occlusal

XL

Occlusal

L

**Occlusal
Adulte**

**Miroirs
métallisés
2 faces**

fabriqué en
France par
PTJ
INTERNATIONAL

CE

Plans miroirs échelle : 1/1

